

# **INSTRUÇÕES DE USO**



# SINGULAR

**PRODUTO:**

**Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular**

Nome técnico: Componentes de Implante Odontológico

**Fabricado por:**

**DMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Endereço: Rua Projetada 19 S/N. Q2J, Lotes 17 e 19 – Bairro Parque das Nações

CEP: 59.156-990. Parnamirim – RN – Fone: (84) 3091-3233









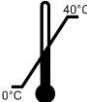






CNPJ: 11.812.152/0001-05 Inscr. Estadual: 20.229.596-6

**Responsável Técnico: Dalton Matos Rodrigues - CRO-RN nº2627**

**Registro ANVISA nº:**

Versão Instrução de Uso: 00

## INSTRUÇÕES DE USO

<b>Legenda da Rotulagem</b>	
	Produto de Uso Único. Proibido Reutilizar
	Consultar Manual do Usuário
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada
	Número no Catálogo
	Número de Lote
	Identificação do fabricante
	Data de Esterilização
	Data de Validade (quando embalagem não violada)
	Limite de temperatura para armazenamento e transporte
	Limite de Umidade Relativa do Ar de Transporte e Armazenamento
	Limite de pressão para armazenamento e transporte
	Proibido o descarte em lixo comum
	Necessidade de proteção contra umidade no transporte e armazenamento.
	Cuidado no transporte e armazenamento (frágil).
	Necessidade de proteção contra luz solar direta.

NOTA: Os símbolos mencionados no modelo de Rótulo estão de acordo com a norma ABNT NBR ISO 15223-1:2015 Produtos para saúde – Símbolos a serem usados em etiquetas, rotulagens e informações a serem fornecidas com os produtos para saúde.

## 1 – IDENTIFICAÇÃO

### 1.1 - Nome e Imagens do Produto

**Nome técnico:** Componentes de Implante Odontológico

**Nome comercial:** Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular

### 1.2 - Tabela Comparativa entre os Modelos (Referência comercial):

Modelo	Descrição	Tipo de Encaixe	Rosca (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro maior (mm)	Compatibilidade	Torque
102.001	PARAFUSO SEXTAVADO HE 3.3	Hexágono	M1.8X0.35	7,7	2,3	Sistema Hexágono Externo Singular	32Ncm
102.002	PARAFUSO SEXTAVADO HE 4.1	Hexágono	M2.0X0.4	8,4	2,5		32Ncm
102.003	PARAFUSO SEXTAVADO HE 5.0	Hexágono	M2.5x0.45	7,6	3,0		32Ncm
102.004	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3.8 - 4.3 - 5.0 NE (M1.6)	Hexágono	M1.6X0.35	8,5	2,2	Sistema Hexágono Interno Singular	32Ncm
102.005	PARAFUSO MINI PILAR	Hexágono	M1.4x0.3	4	2	Componente Mini Pilar Singular	10Ncm
102.006	PARAFUSO QUADRADO HE 3,3	Quadrado	M1.8X0.35	7,7	2,3	Sistema Hexágono Externo Singular	32Ncm
102.007	PARAFUSO QUADRADO HE 4.1	Quadrado	M2.0X0.4	8,4	2,5		32Ncm
102.008	PARAFUSO QUADRADO HE 5.0	Quadrado	M2.5x0.45	7,6	3,0		32Ncm
102.022	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3.75-4.0 - 4.3 - 5.0 (M1.8)	Hexágono	M1.8X0.35	9,2	2,4	Sistema Hexágono Interno Singular	32Ncm
102.023	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3ICE 3.4 - 4.0 - 5.0 (M1.6)	Hexágono	M1.6X0.35	8,4	2,0		32Ncm
102.033	PARAFUSO SEXTAVADO HE 4.1 3D	Hexágono	M2.0X0.4	7	2,4	Sistema Hexágono Externo Singular	32Ncm
102.034	PARAFUSO MINI PILAR 3D	Hexágono	M1.4x0.3	4	2	Componente Mini Pilar Singular	10Ncm
102.037	PARAFUSO SEXTAVADO HE 3.3 3D	Hexágono	M1.8X0.35	8,7	2,3	Sistema Hexágono Externo Singular	32Ncm
102.038	PARAFUSO SEXTAVADO HE 3.4 3D	Hexágono	M2.0X0.4	7	2,3		32Ncm
102.039	PARAFUSO SEXTAVADO HE 5.0 3D	Hexágono	M2.5X0.45	6,5	2,8		32Ncm
102.045	PARAFUSO SEXTAVADO HE 3.4	Hexágono	M2.0X0.4	8,4	2,5		32Ncm
102.046	PARAFUSO QUADRADO HE 3.4	Hexágono	M2.0X0.4	8,4	2,5		32Ncm
102.049	PARAFUSO PT CM S	Hexágono	M1.6X0.35	9,5	2	Sistema Cone Morse Singular	32Ncm
102.051	PARAFUSO TG	Hexágono	M2.0X0.4	4	2,5	Componente Mini Pilar Singular	32Ncm
102.071	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3.8 3D (M1,6)	Hexágono	M1.6X0.35	8,7	2,3	Sistema Hexágono Interno Singular	32Ncm
102.072	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3.8 3D (M1,8)	Hexágono	M1.8X0.35	8,7	2,3		32Ncm
102.090	PARAFUSO MINI PILAR P/ ZIRCONIA	Hexágono	M1.4x0.3	5	2	Componente Mini Pilar Singular	10Ncm
102.126	PARAFUSO SEXTAVADO 1.3 CINTA CM	Hexágono	M1.8X0.35	7,4	2	Sistema Cone Morse Singular	32Ncm
102.130	PARAFUSO BASE CAD CM N (M1.8)	Hexágono	M1.8X0.35	10,2	2,4		32Ncm
120.058	PARAFUSO BL 3.3 - 4.0	Torque	M1.8X0.35	8	2,2		32Ncm
120.059	PARAFUSO RN-WN	Torque	M1.8X0.35	7,5	2,4	Sistema Hexágono Interno Singular	32Ncm

## Imagem do Produto



### 1.3 - Princípio Físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação:

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular são dispositivos médicos fabricados em Titânio Grau V (ASTM F136), tem forma cilíndrica com encaixe na cabeça sextavado, quadrada e torque, contém roscas piramidais com diâmetro correspondente a rosca interna de cada implante, apresentam variação de diâmetros, comprimentos e encaixe para chaves e conexões, de acordo com planejamento escolhido, em virtude do tipo de implante utilizado.

Para o encaixe da chave, apresentam a opção de hexágono, quadrado ou torque em vários modelos e tamanhos.

Este parafuso é usado para fixar componentes protéticos, entre eles: UCLA Calcinável, UCLA Titânio, UCLA Co-Cr, Tibase4 e Pilar Cimentado, tanto hexágono interno, hexágono externo e cone morse.

**Produto Não Estéril. Esterilizar Antes do Uso.**

**Nota:** Somente o Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular é objeto deste Registro na ANVISA. Outros produtos mencionados nesta Instrução de Uso possuem registro a parte na ANVISA e devem ser adquiridos separadamente.

### 1.4 - Partes e acessórios acompanhantes

**Materiais de consumo:** Não Aplicável

**Materiais de apoio:** Etiqueta de Rastreabilidade.

#### Itens de fabricação para uso exclusivo nos produtos:

Atenção: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nesta “Instruções de Uso” é de inteira responsabilidade do usuário.

Os itens fornecidos, objeto deste registro, não são compatíveis com outros sistemas cirúrgicos e com outros fabricantes.

### 1.5 - Especificações e Características Técnicas

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular são produzidos em Titânio Grau V (ASTM F136) e comercializados não-estéreis. Este produto é de uso único, sendo proibida a sua reutilização.

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular têm forma cilíndrica com encaixe na cabeça sextavado, contém roscas piramidais com diâmetro correspondente a rosca interna de cada implante, apresentam variação de diâmetros, comprimentos e encaixe para chaves e conexões.

Para o encaixe da chave, apresentam a opção de hexágono, quadrado ou torque em vários modelos e tamanhos.

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular em todos os seus modelos são vendidos unitariamente e não acompanha acessórios.

## **2 – DESEMPENHO DO PRODUTO**

### 2.1 - Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular são componentes com função de fixação de prótese sobre implante.

São indicados para fixação de componentes protéticos, entre eles: UCLA Calcinável, UCLA Titânio, UCLA Nobre, UCLA Tílite, Munhão e Pilar Sextavado, tanto hexágono interno quanto hexágono externo.

Há vários tamanhos disponíveis para se adequarem ao tipo de implante utilizado.

## 2.2 - Tabela Comparativa entre os Modelos e Compatibilidade

Modelo	Descrição	Compatibilidade
102.001	PARAFUSO SEXTAVADO HE 3.3	Sistema Hexágono Externo Singular
102.002	PARAFUSO SEXTAVADO HE 4.1	Sistema Hexágono Externo Singular
102.003	PARAFUSO SEXTAVADO HE 5.0	Sistema Hexágono Externo Singular
102.004	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3.8 - 4.3 - 5.0 NE (M1.6)	Sistema Hexágono Interno Singular
102.005	PARAFUSO MINI PILAR	Componente Mini Pilar Singular
102.006	PARAFUSO QUADRADO HE 3,3	Sistema Hexágono Externo Singular
102.007	PARAFUSO QUADRADO HE 4.1	Sistema Hexágono Externo Singular
102.008	PARAFUSO QUADRADO HE 5.0	Sistema Hexágono Externo Singular
102.022	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3.75-4.0 - 4.3 - 5.0 (M1.8)	Sistema Hexágono Interno Singular
102.023	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3ICE 3.4 - 4.0 - 5.0 (M1.6)	Sistema Hexágono Interno Singular
102.033	PARAFUSO SEXTAVADO HE 4.1 3D	Sistema Hexágono Externo Singular
102.034	PARAFUSO MINI PILAR 3D	Componente Mini Pilar Singular
102.037	PARAFUSO SEXTAVADO HE 3.3 3D	Sistema Hexágono Externo Singular
102.038	PARAFUSO SEXTAVADO HE 3.4 3D	Sistema Hexágono Externo Singular
102.039	PARAFUSO SEXTAVADO HE 5.0 3D	Sistema Hexágono Externo Singular
102.045	PARAFUSO SEXTAVADO HE 3.4	Sistema Hexágono Externo Singular
102.046	PARAFUSO QUADRADO HE 3.4	Sistema Hexágono Externo Singular
102.049	PARAFUSO PT CM S	Sistema Cone Morse Singular
102.051	PARAFUSO TG	Componente Mini Pilar Singular
102.071	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3.8 3D (M1,6)	Sistema Hexágono Interno Singular
102.072	PARAFUSO SEXTAVADO HI 3.8 3D (M1,8)	Sistema Hexágono Interno Singular
102.090	PARAFUSO MINI PILAR P/ ZIRCONIA	Componente Mini Pilar Singular
102.126	PARAFUSO SEXTAVADO 1.3 CINTA CM	Sistema Cone Morse Singular
102.130	PARAFUSO BASE CAD CM N (M1.8)	Sistema Cone Morse Singular
120.058	PARAFUSO BL 3.3 - 4.0	Sistema Cone Morse Singular
120.059	PARAFUSO RN-WN	Sistema Hexágono Interno Singular

## 2.3 - Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contraindicações

**Contraindicações:** Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular não apresentam contraindicações desde que suas indicações, finalidades e torques sejam seguidos corretamente.

**Efeitos Colaterais:** Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular são componentes protéticos usados na colocação de componentes protéticos. Efeitos adversos apenas ocorrerão se a escolha dos parafusos, conexões e torque forem indevidos, podendo ocasionar danos à sequência de prótese sobre o implante a ser instalado.

## 3 - INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO

Após selecionar o componente, encaixar o mesmo sobre o implante, intra-bucal.

Parafusar o componente no implante com o uso da chave adequada ao tipo do parafuso, sextavado, quadrado ou torque, de acordo com o modelo escolhido.

Utilizar o torque de 15N.cm a 32N.cm de acordo com o modelo de parafuso selecionado.

#### **4 – ESTERILIZAÇÃO**

O produto é vendido não estéril. Esterilizar antes do uso. Esterilizar o produto conforme abaixo:

Esterilização por Autoclave

Temperatura esterilização: 134°C;

Pressão de Esterilização: 2,0 a 2,2 Vapor Saturado kgf/cm<sup>2</sup>;

Ciclo de esterilização: 16 minutos

Ciclo de secagem: 20 – 60 minutos.

#### **5 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular são acondicionadas em embalagens primária tipo blister (filme e tyvek) e embalagem secundária de papel cartonado.

- Embalagem primária: formada por filme PET (polietileno tereftalato) rígido e transparente; e tyvek.

O filme e o tyvek são adquiridos separadamente sendo selados em máquina apropriada.

- Embalagem secundária: composta por papel cartonado. Adicionalmente, na embalagem secundária, são incluídos 03 Etiquetas de Rastreabilidade.

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular estão disponíveis em diversos modelos a fim de facilitar a escolha adequada para cada caso.

Dentro de cada embalagem primária é embalado: 01 Parafuso de Procedimentos Protéticos Singular.

#### **6 - ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES SOBRE O USO**

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração em sua embalagem quando nas condições de recebimento.

**Os itens fornecidos, objeto deste registro, não são compatíveis com outros sistemas cirúrgicos e com outros fabricantes.**

Não utilizar o produto em casos de violação da embalagem ou descaracterização do produto.

Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada ou deteriorada.

Ao abrir a embalagem, verificar o estado superficial do produto, bem como averiguar se não existem manchas, arranhões, deformações, etc.. Durante o transporte e/ ou manuseio incorreto podem ocorrer alterações que danifiquem o produto e restrinja seu uso. Caso isto seja evidenciado, o produto não deve ser utilizado, devendo ser substituído. Usar somente produtos que mantenham o seu estado superficial íntegro.

“Produto Não Estéril. Esterilizar Antes do Uso”.

Produto de uso único. PROIBIDO REPROCESSAR.

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular exigem procedimentos protéticos especializados, somente deverá ser executado por protesistas e protéticos com treinamento específico em prótese sobre implante. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.

Não é permitida a utilização deste produto para quaisquer outros fins que não a especificados nesta Instrução de Uso.

## **7 – PRECAUÇÕES EM CASO DE INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO**

Em caso de descarte deve atender as exigências da RDC 306 de 2004 – ANVISA, Resolução nº 358, de 2005 do Ministério do Meio Ambiente e as demais legislações vigentes em nível estadual e municipal, evitando sua reutilização.

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular a serem descartados devem ser classificados como pertencentes ao grupo A1 (Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.).

O produto, antes do descarte propriamente dito, deve ser tratado através de processo físico ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (*Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10, e inativação de esporos do B. stearotherophilus ou de esporos do B. subtilis com redução igual ou maior que 4Log10.*).

Adicionalmente, o produto deve ser descaracterizado, antes do descarte.

O processo de descaracterização deve desestruturar as suas características físicas, de modo a tornar o produto irreconhecível.

Após o tratamento, podem ser acondicionados como resíduos do Grupo D.

## **8 - CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E/OU MANIPULAÇÃO**

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular devem ser armazenados em local limpo, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob temperatura entre +0° e +40°C – umidade Relativa: 60% máx – Pressão Atmosférica: 90 à 105 kPa.

Os parafusos devem ser armazenados de forma a manter suas configurações e seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem.

Uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto deve ser realizada, pois podem ocorrer alterações durante o transporte e/ ou manuseio incorreto que danifiquem o produto e restrinja seu uso. Caso isto seja evidenciado, o produto não deve ser utilizado, devendo ser substituído.

Não estocar os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular em prateleiras altas, próximas de lâmpadas (para não ressecar a embalagem ou apagar o rótulo). Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular não podem ser armazenados diretamente no chão e em áreas onde sejam utilizadas substâncias contaminantes como inseticidas, pesticidas ou materiais de limpeza. Todos os produtos devem ser manuseados com cuidado. O manuseio inadequado pode danificar e/ou prejudicar o funcionamento adequado do produto. O produto não poderá sofrer choque mecânico como queda, batida, pois poderá introduzir tensões internas que comprometerão a vida útil do produto.

## **9 - RASTREABILIDADE DO PRODUTO**

Dentro da embalagem secundária dos Parafusos (embalagem papelão cartonado) são colocadas três etiquetas adesivas contendo as seguintes informações:

- Nome e Modelo do Produto;
- Dimensões do Produto;
- Número do Lote do Produto e;
- Razão Social e CNPJ do Fabricante.

Tamanho da etiqueta: 45 x 13mm. Estas etiquetas são fornecidas visando promover a rastreabilidade do produto.

O procedimento de rastreabilidade de competência do profissional de saúde consiste em colar uma das etiquetas no “Prontuário do Paciente” e outra na “Carteira de Garantia do Paciente”, que fica de posse do paciente. A terceira etiqueta é enviada ao protesista. Estas medidas visam garantir o correto tratamento do paciente e permitir que as informações relativas ao processo produtivo sejam consultadas.

### **10 – VIDA ÚTIL DO PRODUTO**

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular possuem validade Indeterminada, desde que a embalagem esteja íntegra e inviolada.

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular são produtos médicos implantáveis, invasivos cirurgicamente, e se corretamente instalados e osteointegrados, o tempo de permanência do produto dentro do paciente é indeterminado.

### **11 – PROCEDIMENTOS ADICIONAIS PARA REUTILIZAÇÃO**

Os Parafusos de Procedimentos Protéticos Singular são vendidos NÃO ESTÉRIL e de USO ÚNICO, sendo proibido o processo de reutilização. Devem ser esterilizados antes do uso.

### **12 – TERMO DE GARANTIA**

A DMR Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos LTDA., assegura ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 365 dias, contados da data de aquisição.

*Nota.: A presente garantia só é válida juntamente com a Nota Fiscal*

### **13 – TERMO DE RESPONSABILIDADE**

A empresa DMR Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos LTDA., representada por seu Responsável Técnico/ Responsável Legal, abaixo assinado, assume a responsabilidade técnica e legal pelo produto e que todas as informações contidas nestas “Instruções de Uso”, são verdadeiras.

---

Responsável Legal/ Responsável Técnico  
Dalton Matos Rodrigues - CRO-RN nº 2627

---